

- Navette
- La Poste
- Client
- Transporteur

HYGIÈNE DES ÉLEVAGES

VOLAILLES CHAIR AVANT ABATTAGE

Reçu le : Enregistré par : **DOSSIER N°** :

INUAU :

N° Bâtiment : **N° Lot** :

ELEVEUR

Nom / Prénom :

Adresse :

.....

Tel : E mail :

.....

Nom du Préleveur :

E mail :

Demandeur :

.....

Vétérinaire sanitaire :

E mail :

Organisation de production :

ESPÈCE : Poulet de chair
 Dinde Canard Autre :

DATE DE PRÉLÈVEMENT : / /

Couvoir d'origine :

DATE de mise en place : / /

ÂGE des animaux : jours et Nombre :

DATE prévue d'abattage : / /

NATURE PRÉLÈVEMENT :

2 paires de Pédichiffonnettes réunies en un seul contenant à l'élevage
 +
 2 chiffonnettes réunies dans un seul contenant à l'élevage si animaux traités

(Description de la méthode de prélèvement au dos de cette feuille)

FACTURE A : Eleveur
 Autre

EXAMENS DEMANDÉS :

Salmonella (tous sérotypes) *

Norme NF U 47-100 avec une méthode d'enrichissement :
Celle de l'annexe D ISO 6579

Accréditation n°1-5676 Essais (analyses sous couvert de l'accréditation COFRAC repérées par le symbole *, sous réserve du domaine d'application de la méthode).

DUPLICATA RÉSULTATS

Courrier au : Prélevé Demandeur Autre*

Email au : Prélevé Demandeur Autre*

*Autre :

PRISE EN CHARGE PAR :

LE :

Service interne LABOCEA *Hygiène des Élevages*

DATE :

BON POUR ACCORD :

Code INUAU	Type prélèvement	Etiquette	Toutes Salmonelles	SE+ST à renseigner si présence d'une différente de SE ST	LNR
Réf. Prélèvement					

Résultat rendu le :/...../..... Par Saisie le :/...../..... Par

COMMENT PRÉLEVER AVEC 2 PAIRES DE CHAUSSONS :


Les dispositifs pour contrôle de surface doivent être stockés et transportés avec précaution dans des conditions protégeant des contaminations extérieures : emballage réservé uniquement à ces dispositifs.



1 Enfiler les surbottes en plastique une fois arrivé dans le poulailler



2 Se désinfecter soigneusement les mains puis enfiler les gants

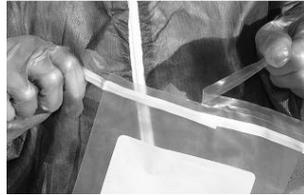

3 Déchirer le haut du sachet



4 Ouvrir le sachet en saisissant les languettes



5 Prendre les chaussons dans le sachet



6 Enfiler une première paire de Sterisox



7 Enfiler la deuxième paire de chaussons par-dessus les autres



8 Conserver le sachet de prélèvement



9 Marcher sur la litière au minimum 3 minutes sur toute la longueur du bâtiment



10 Récupérer les 2 premiers chaussons imprégnés de fientes et les placer dans le sachet



11 Marcher sur la litière avec la paire restante



12 Retirer les 2 derniers chaussons et les joindre aux précédents dans le sachet de prélèvement



13 Bien chasser l'air présent dans le sachet.
Puis enrrouler le haut du sachet 4 fois vers vous



14 Replier les languettes latérales pour assurer l'étanchéité



15 Retirer les gants et identifier le sachet de prélèvement (nom de l'élevage)



Chaque paire de chaussettes doit couvrir environ 50 % de la surface du poulailler.

TRANSFERT A LABOCEA :

Par courrier postal : Placer le sachet de prélèvement dans un sachet extérieur bien fermé, puis, le placer dans l'emballage postal fourni par Labocea.