

PRELEVEMENT DES FONDS DE BOITE :
MODE D'EMPLOI DU KIT

1. Se laver soigneusement les mains.
2. Ouvrir le kit de prélèvement "fonds de boîte".
3. Enfiler les gants présents à l'intérieur de l'enveloppe pré affranchie.
4. Récupérer 5 cartons de garnitures des fonds de boîte de poussins en privilégiant les morceaux souillés par les poussins. Ne pas dépasser ce nombre de 5 fonds de boîte.
5. Introduire les fonds de boîte dans le sac plastique fourni (dans l'enveloppe pré affranchie).
6. Identifier le sac de prélèvement (nom du bâtiment d'élevage).
7. Glisser le sac de prélèvement dans l'enveloppe pré affranchie, accompagnée de cette feuille de commémoratif renseignée.
8. Poster l'enveloppe.