



KIT PARASITOLOGIE

Votre vétérinaire effectue la prescription et le suivi parasitaire de votre animal.
Vos experts Labocéa vous accompagnent pour les consignes de prélèvements, les résultats et les modalités d'envoi.

CONSIGNES DE PRÉLÈVEMENT POUR LES FÈCES

- Privilégier le prélèvement rectal ou les fèces fraîchement émis (matières n'ayant eu aucun contact avec le sol).
- La quantité nécessaire est de 10 à 30 g, soit un pot rempli au $\frac{3}{4}$.
- Respecter une conservation, envoi sous régime du froid positif, sous 24 h pour les recherches de strongles respiratoires avec une réception au laboratoire du lundi au jeudi, pouvant aller jusqu'à 72 h pour les autres prélèvements.

CONSIGNES DE PRÉLÈVEMENT POUR LES SANGS

- Maintien et transfert sous régime du froid positif, pour réception au laboratoire sous 7 jours maximum.

TRANSMISSION DES PRÉLÈVEMENTS

Les échantillons peuvent transiter vers nos sites via la collecte de votre cabinet vétérinaire, Colissimo ou Chrono 13.

Les bons « Colissimo » peuvent vous être partagés à la demande.

Concernant les étiquettes Chrono 13, vous pouvez les télécharger en scannant le QR code ci-dessous (ou sur la page www.labocea.fr/kit-parasitologie) :

QUIMPER



PLOUFRAGAN



FOUGÈRES



En renseignant vos informations d'expéditeur, vous pouvez générer une étiquette, la télécharger, l'imprimer et la coller sur votre colis pour le déposer à La Poste (réception avant 13 h le lendemain).

Hors collecte, le colis sera pesé à réception et les frais d'envoi seront ajoutés au dossier.

Labocéa est à votre écoute : nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

02 96 69 02 10
sante.animale@labocea.fr

Assemblage du kit
réalisé par

 Association
Filéas
ESAT Vitré